

VISK

IEC60601-1
IEC60601-1-2
医療安全規格
準拠

USBメディア対応
HDメディカルレコーダー

MR-200

定価 470,000円



手元でカンタン操作。

www.visk.jp






カンタンに高画質な 録画ができます

患者の皆様への情報提供や、
症例検討・学会発表の資料として
ハイビジョン映像を記録できます。

各機器から

映像出力を
MR-200 に接続

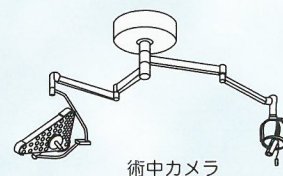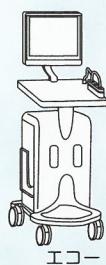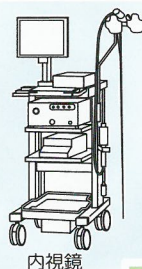

USBメディアへ




ボタンを押すと
記録開始

USBメディアに記録



または

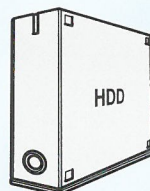

USBメディアをパソコンに接続
すると動画の再生・編集
ができます



MR-200の特長

カンタン録画

- ・リモコンボタン1つの操作
- ・光るリモコンでわかりやすい
- ・直感的な操作
- ・本体での録画操作不要

カンタン再生

- ・一般的な動画ファイル(MP4)
- ・USBを差し込むだけで簡単再生

長時間録画


- ・USB-HDDの場合、最大24時間
連続録画が可能

高画質

- ・1920×1080 (FULL HD) の解像
度に対応
- ・より鮮明な映像記録が可能

幅広い

- ・エコー
- ・内視鏡
- ・顕微鏡
- ・腹腔鏡

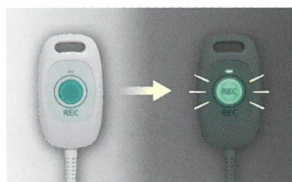


暗い場所でもくっきり



再生環境に困らない



最大24時間連続記録

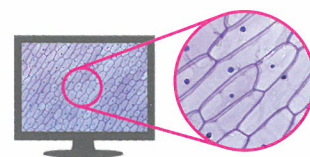

映像を高画質で記録

胎児の成長記録を見られます


胎児の成長を映像で妊婦さんにお渡しできます。
USBメモリに記録できるので保管や
持ち運びもカンタンです。



産婦人科の
導入例

病院で

USBメモリを販売

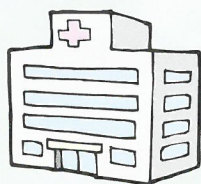

USBメモリに胎児の映像を記録



自宅で

検診時にUSBメモリを病院へ



家族と一緒に映像を見る



オリジナルUSBメモリのご案内

医院様名やオリジナルロゴをUSBメモリと梱包箱に印刷することができます。
再生ソフトをインストール済。

※デザイン料は別途申し受けます

撮影日などを記録できます



セット内容

患者用カード
取扱説明書

USB 本体



※青文字は印刷例です



利用範囲

- ・産婦人科
- ・眼科
- ・外科
- ・循環器科

FAQ

Q 記録した映像の再生方法は？

A Windows7以降とMacOSXならUSBを挿すだけで再生可能です。
WindowsXP や Vista では再生ソフトをインストールすることにより再生が可能です。

オリジナルUSB メモリをご使用の場合、再生ソフトのインストールは不要です。

Q ウイルスの心配はないですか？

A MR-200 を介してウイルスを広げる心配はありません。

また、MR-200 本体についてもウイルスの影響を受けることはありません。

Q USBメディアはどれでも使えますか？

A USBメディアは当社指定品をご使用ください。

詳細につきましては弊社 WEB サイトに掲載しております。

仕様

電源及び環境	ネットワーク	PCから記録されたファイルをネットワーク(100BASE-TX)経由でコピー
	外部入力	専用リモコン入力(録画開始/停止)
	時刻	時計機能内蔵 リチウム電池によるバックアップ(約6年以上)
	電源電圧	DC12V(±10%): ACアダプタ付属
	消費電力	11W以下
	外部寸法	210mm(W)×44mm(H)×150mm(D) (突起物除く)
	質量	1.5kg以下
使用環境	温度 0℃～40℃ 湿度 20%～85%(結露なきこと)	

映像	入力端子	DVI-I(DVI-D or アナログRGB)
	出力端子(サブモニター用)	DVI-D
	入力フォーマット	XGA/SVGA/SXGA/1080i/720p/1080p ※2
	出力フォーマット	入力フォーマットに準ずる
	動画符号化方式	H.264 High profile level 4.0
	動画符号化レート	高画質:12Mbps、標準:9Mbps
	入力信号	LINE入力(ステレオ: RCAコネクタ×2)
音声	サンプリング周波数	32kHz
	符号化方式	MPEG4 AAC LC profile
	符号化レート	128kbps
保存	ファイル形式	MP4形式
	対応外部メディア	USBメモリ(FAT32形式/EXT3形式) USB-HDD(FAT32形式/EXT3形式)
	記録可能時間 ※3 ※4 (動画符号化レート:9Mbps時)	メディア容量 8GB 約120分
		メディア容量 16GB 約240分 メディア容量 32GB 約480分

- ※1 USBメモリ・USB-HDDは、本機との相性によりご利用できない、または正常に記録できない場合があります。弊社指定品をお使いください(指定品は弊社HPをご確認ください)。
※2 アナログRGBはXGA、SVGA、SXGAのみ対応。XGA/SVGA/SXGA/1080pでの記録フレームは単純引きにて約30fpsとなります。
※3 記録時間は目安。FAT32形式での記録の場合、録画ファイルが1.9Gbyteを超える場合、または、録画時間が2時間を越える場合はファイルが分割されます。
※4 EXT3での記録の場合、録画時間は1ファイル最大24時間または、記録メディアの容量以内のいずれかになります。
※5 USBハブを使用した場合の動作は保証しておりませんので、ご使用にならないでください。


付属品



オプション(オプション価格)



外観/背面図

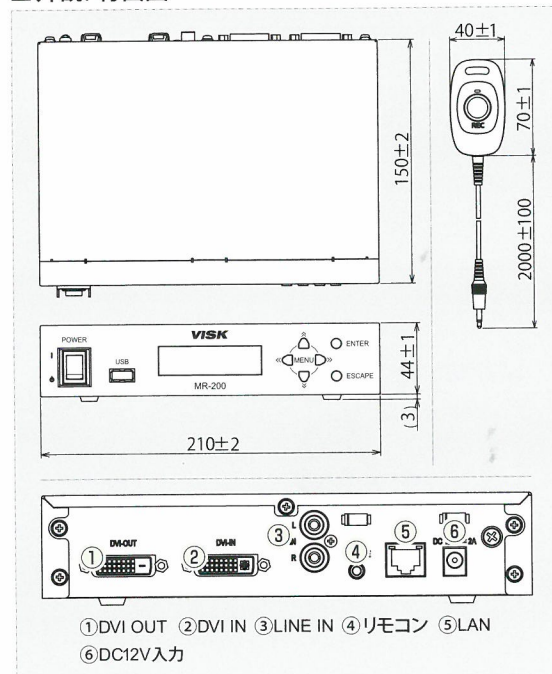

- ①DVI OUT ②DVI IN ③LINE IN ④リモコン ⑤LAN
⑥DC12V入力

注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

- 部品の価格には、設置調整・付帯工事費・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。
●仕様及び価格は変更することがありますのでご了承ください。
VISKは株式会社中日電子の登録商標です。

製品に関するお問い合わせは

テクノライゾングループ

株式会社 中日電子

〒467-0852 名古屋市中区瑞穂区明前町8番18号

☎ 0120-552-509 月曜日～金曜日 9:00～17:00

(土・日・春期・夏期・年末年始・他弊社休業日を除く)

Email: info@kcd.co.jp URL: http://www.kcd.co.jp